


# 相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : ALP  
 装置 : 日立クリニカルアナライザー  
 試薬名 : セラテストム ALP  
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

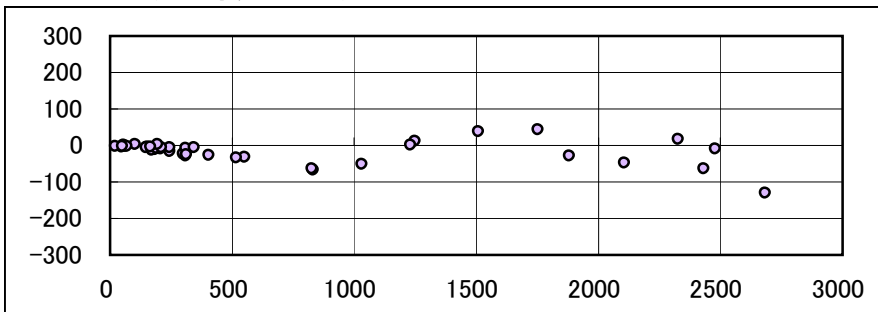

散布図

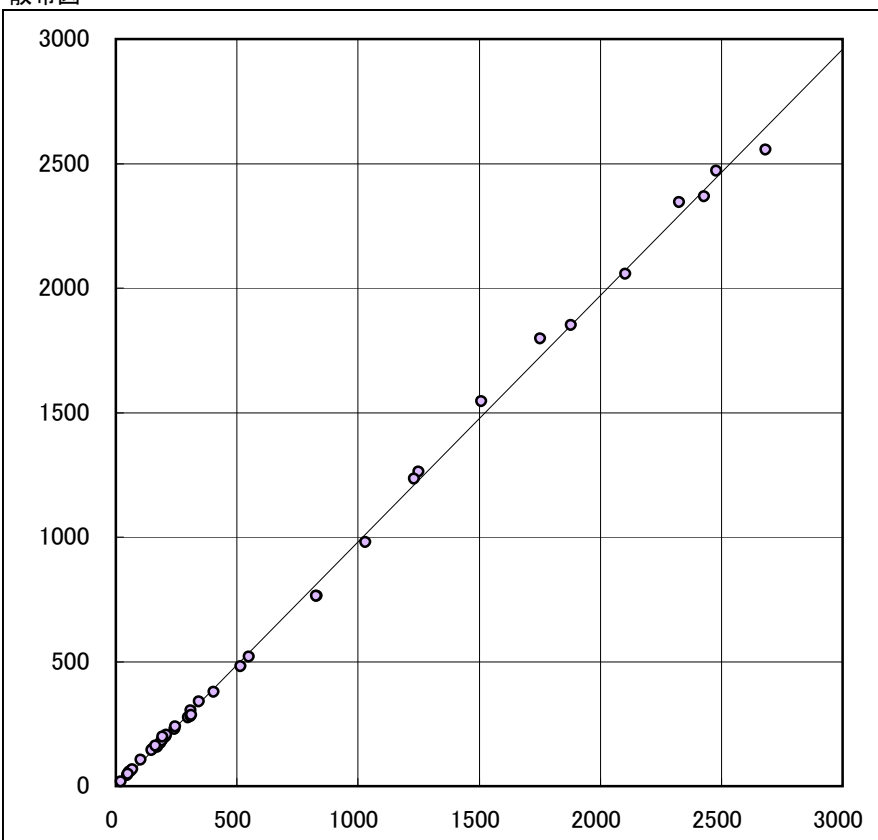

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	ALP
試薬名	-
単位	U/L

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	ALP
試薬名	セラテストム ALP
単位	U/L

n = 40

r = 0.999

Y = aX + b  
 傾き a = 0.988 切片 b = -6.950

X平均 = 702.0

Y平均 = 686.8

Sy·x = 28.81

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	47	44	298	275						
2	60	59	830	764						
3	102	105	243	228						
4	153	149	516	482						
5	55	56	309	281						
6	21	19	1030	980						
7	68	67	193	186						
8	50	49	405	379						
9	2683	2554	827	763						
10	2327	2345	310	303						
11	2105	2057	148	143						
12	1880	1852	184	173						
13	2478	2470	171	158						
14	2430	2367	189	182						
15	1752	1796	245	239						
16	1508	1546	210	205						
17	1249	1262	194	197						
18	1231	1233	165	161						
19	207	198	311	286						
20	551	519	344	339						

備考