



# 相関性

項目 : CK  
 施設 : カスタマーサポートセンター  
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー : 積水メディカル(株)  
 試薬名 : エクセライザCK  
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

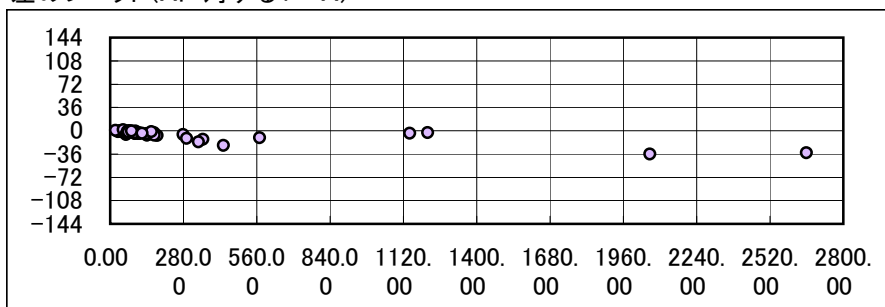

散布図

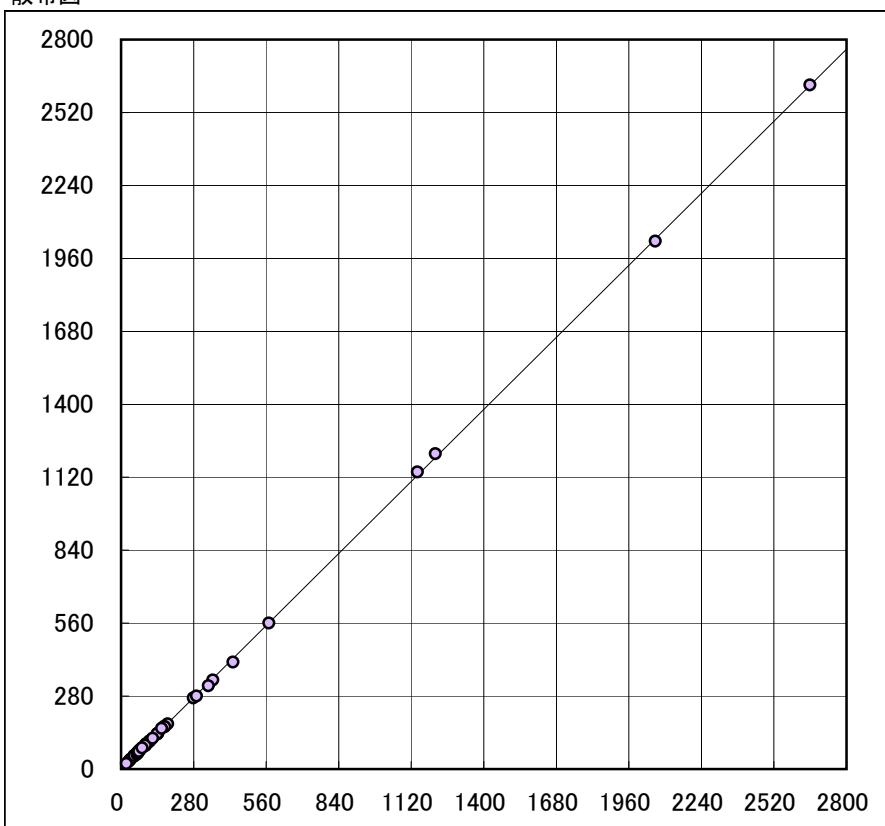

試料 血清

X軸  
 装置 日立7170  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 CK-L 7170  
 試薬名 ピュアオートS CK-L  
 単位 mg/dl

Y軸  
 装置 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 CK  
 試薬名 エクセライザCK  
 単位 U/L

n = 48

r = 0.9999

Y = aX + b  
 傾き a 0.9878 切片 b -2.2

X平均 = 264.4

Y平均 = 259.0

Sy·x = 4.7

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	2659	2625	96	91	665					
2	2062	2026	113	108	157	156				
3	1213	1210	108	103	50	52				
4	1144	1140	99	96	97	96				
5	571	560	143	137	62	56				
6	279	273	72	70	66	65				
7	110	107	433	410	94	91				
8	53	50	180	173	65	61				
9	94	90	50	49	70	68				
10	98	96	21	21	82	81				
11	355	341	72	72	122	118				
12	31	29	63	62						
13	60	57	81	81						
14	60	59	167	164						
15	38	38	67	63						
16	141	134	169	162						
17	292	280	63	61						
18	35	34	128							
19	337	320	42							
20	63	62	140	135						