



相関性

項目 : CRE
 施設 : カスタマーサポートセンター
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー : 積水メディカル(株)
 試薬名 : エクセライザCRE
 単位 : mg/dl

差のプロット(Xに対するY-X)

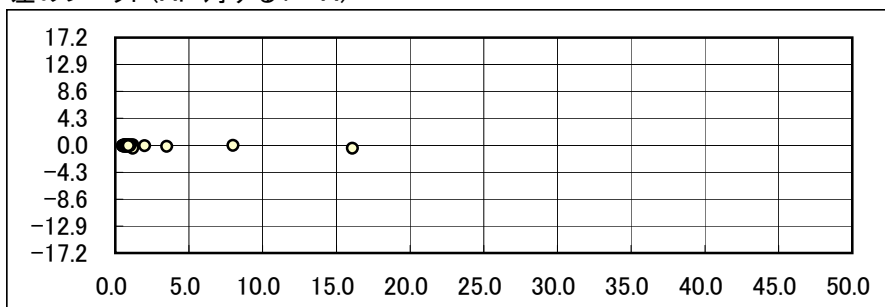

散布図

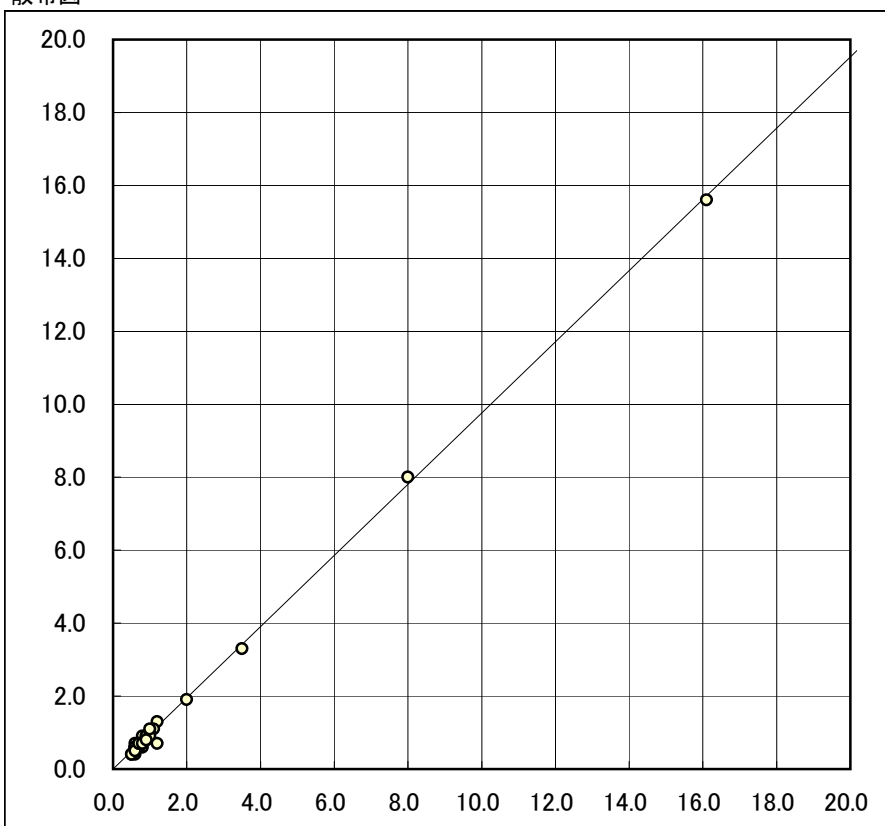

試料 血清

X軸
 装置 日立7170
 メーカー 積水メディカル
 項目 CRE 7170
 試薬名 ピュアオートS CRE-N
 単位 mg/dl

Y軸
 装置 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー 積水メディカル
 項目 CRE
 試薬名 エクセライザCRE
 単位 mg/dl

n = 43

r = 0.9991

Y = aX + b
 傾き a 0.9769 切片 b -0.040

X平均 = 1.40

Y平均 = 1.33

Sy · x = 0.108

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1				
2	0.6	0.4	0.7	0.6	0.8	0.7				
3	3.5	3.3	0.8	0.9	0.9	0.8				
4	0.7	0.6	0.6	0.6	8.0	8.0				
5	0.6	0.6	0.9	0.9	16.1	15.6				
6	0.6	0.5	0.8	0.7						
7	0.5	0.4	0.6	0.6						
8	1.2	1.3	0.7	0.6						
9	0.8	0.7	1.0	1.0						
10	0.8	0.6								
11	2.0	1.9								
12	0.7	0.7	0.9	0.8						
13	1.1	1.1	1.2	0.7						
14	0.8	0.7	0.7	0.6						
15	0.7	0.7	0.5	0.4						
16	0.9	0.8	0.6	0.5						
17	0.9	0.9	0.9	0.9						
18	0.6	0.5	0.7	0.7						
19	0.9	0.8	1.0	0.9						
20	0.8	0.8	0.7	0.7						