


CRE相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : CRE
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム CRE
 単位 : mg/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

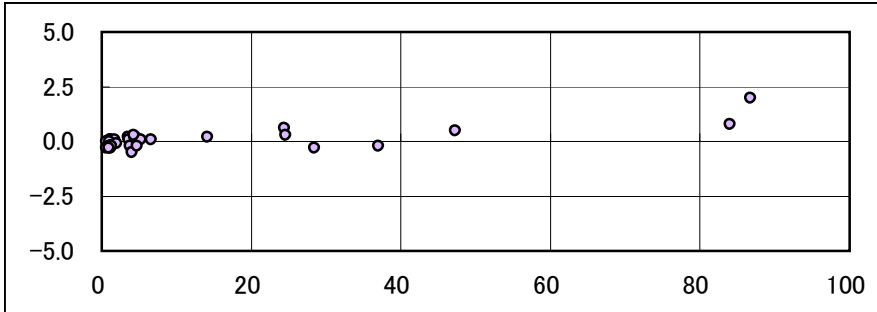

散布図

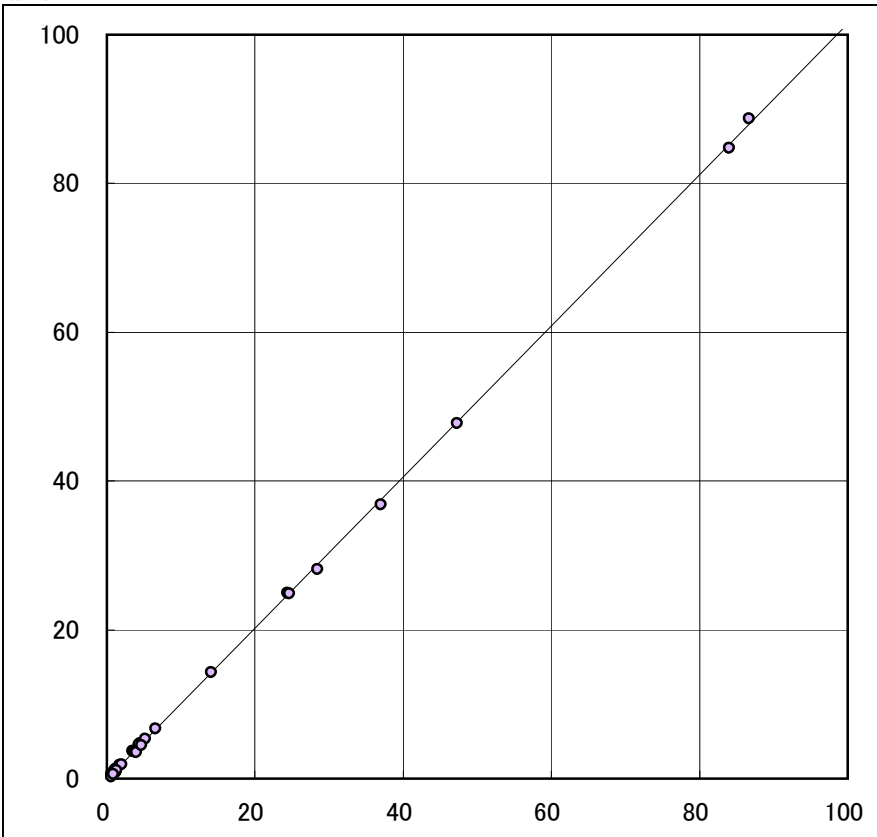

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	CRE
試薬名	-
単位	mg/dL

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	CRE
試薬名	セラテストム CRE
単位	mg/dL

n = 36

r = 1.000

Y = aX + b
 傾き a 1.016 切片 b -0.131

X平均 = 11.43

Y平均 = 11.48

Sy·x = 0.281

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	14.1	14.3	4.3	4.6						
2	24.4	25.0	3.8	3.6						
3	47.3	47.8	4.0	3.5						
4	37.0	36.8	4.7	4.5						
5	24.6	24.9	2.0	1.9						
6	28.4	28.1	1.1	0.9						
7	84.0	84.8	1.2	1.0						
8	1.1	1.2	1.2	1.0						
9	3.5	3.7	1.2	0.9						
10	0.8	0.8	1.2	1.0						
11	3.6	3.7	1.2	1.0						
12	1.2	1.3	1.1	0.8						
13	4.4	4.6	1.1	0.9						
14	0.6	0.6	1.3	1.1						
15	4.5	4.7	0.9	0.6						
16	0.6	0.3	86.7	88.7						
17	5.2	5.3								
18	1.7	1.8								
19	6.6	6.7								
20	1.0	1.0								

備考