



# 相関性

項目 : **GLU**  
 施設 : カスタマーサポートセンター  
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー : 積水メディカル(株)  
 試薬名 : エクセライザ GLU  
 単位 : mg/dl

差のプロット(Xに対するY-X)

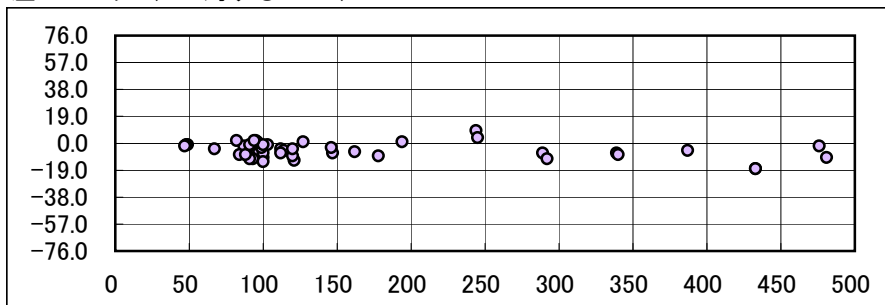

散布図

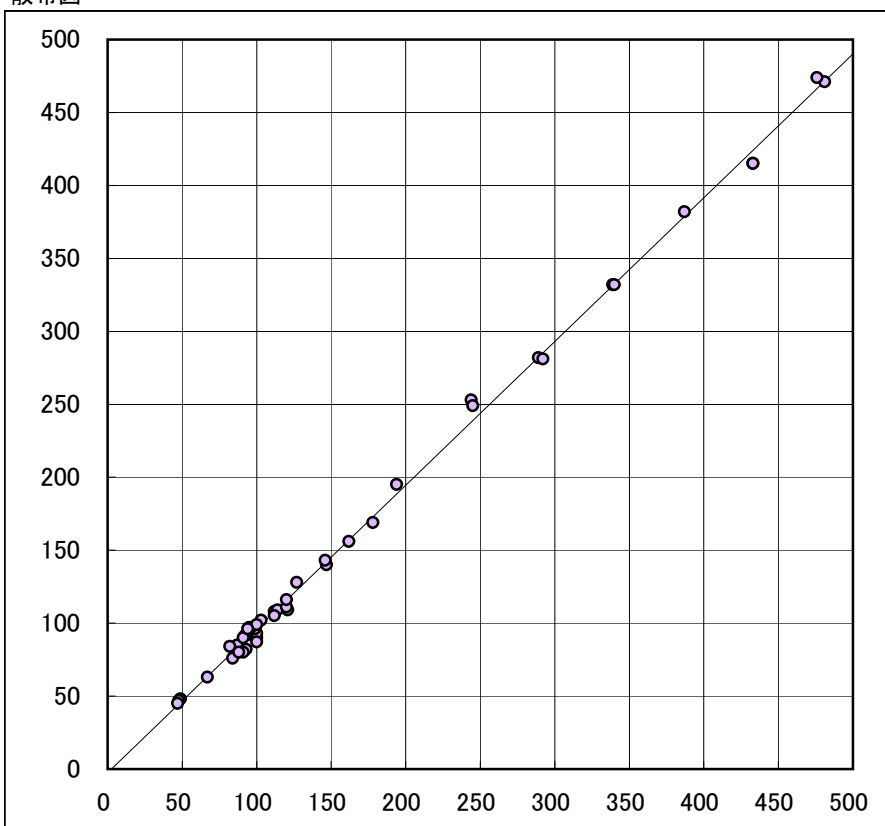

試料 血清

X軸  
 装置 日立7170  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 GLU(7170)  
 試薬名 ピュアオートS GLU  
 単位 mg/dl

Y軸  
 装置 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 GLU  
 試薬名 エクセライザ GLU  
 単位 mg/dl

n = 50

r = 0.9990

Y = aX + b  
 傾き a 0.9853 切片 b -2.47

X平均 = 159.5

Y平均 = 154.7

Sy·x = 5.14

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	49	48	121	109	84	76				
2	48	47	89	81	120	111				
3	97	93	162	156	91	80				
4	97	92	88	80	88	80				
5	147	140	103	102	112	105				
6	146	143	92	91	120	116				
7	194	195	93	92	178	169				
8		198	87	85	91	90				
9	244	253	100	90	82	84				
10	245	249	100	93	94	96				
11	289	282	93	82	67	63				
12	292	281	100	87	47	45				
13	339	332	112	108						
14	340	332	99	96						
15	387	382	95	95						
16		381	114	109						
17	433	415	96	97						
18	433	415	127	128						
19	481	471	95	97						
20	476	474	100	99						