


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : TP
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム TP
 単位 : g/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

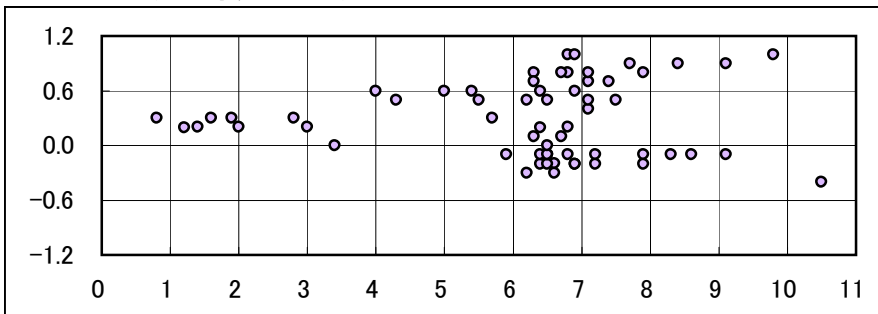

散布図

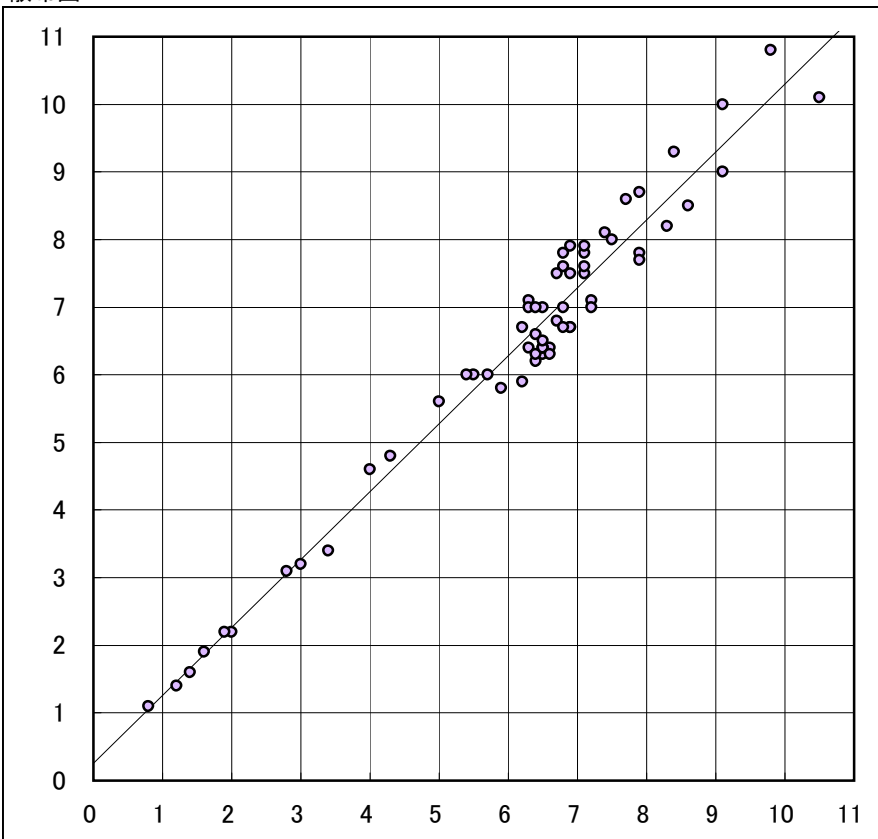

試料 血清

| X軸 | |
|------|----------|
| 装置 | 日立自動分析装置 |
| メーカー | A社 |
| 項目 | TP |
| 試薬名 | — |
| 単位 | g/dL |

| Y軸 | |
|------|---------------|
| 装置 | 日立クリニカルアナライザー |
| メーカー | 日立化成工業(株) |
| 項目 | TP |
| 試薬名 | セラテストム TP |
| 単位 | g/dL |

n = 62

r = 0.982

Y = aX + b
 傾き a 1.004 切片 b 0.256

X平均 = 6.20

Y平均 = 6.48

Sy·x = 0.408

式選択 直線回帰式

備考

| | 1~20 | | 21~40 | | 41~60 | | 61~80 | | 81~100 | |
|----|------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|--------|---|
| | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 6.2 | 5.9 | 8.3 | 8.2 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 7.6 | | |
| 2 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | 6.9 | 7.9 | | |
| 3 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 7.7 | 1.2 | 1.4 | | | | |
| 4 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | | | | |
| 5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 1.9 | | | | |
| 6 | 5.9 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | | | | |
| 7 | 10.5 | 10.1 | 3.0 | 3.2 | 6.8 | 7.8 | | | | |
| 8 | 8.6 | 8.5 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | | | | |
| 9 | 9.1 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 7.6 | | | | |
| 10 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | | | | |
| 11 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | | | | |
| 12 | 6.4 | 6.6 | 4.0 | 4.6 | 6.7 | 7.5 | | | | |
| 13 | 6.7 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 7.7 | 8.6 | | | | |
| 14 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | | | | |
| 15 | 7.2 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 6.8 | 7.0 | | | | |
| 16 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | | | | |
| 17 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | | | | |
| 18 | 6.4 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 7.9 | 8.7 | | | | |
| 19 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 9.8 | 10.8 | | | | |
| 20 | 6.5 | 6.4 | 2.8 | 3.1 | 7.4 | 8.1 | | | | |