



相関性

項目 : ALB
 施設 : カスタマーサポートセンター
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー : 積水メディカル(株)
 試薬名 : ALB
 単位 : g/dl

差のプロット(Xに対するY-X)

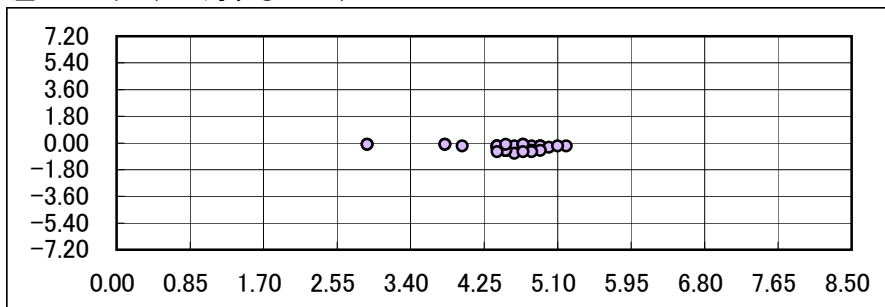

散布図

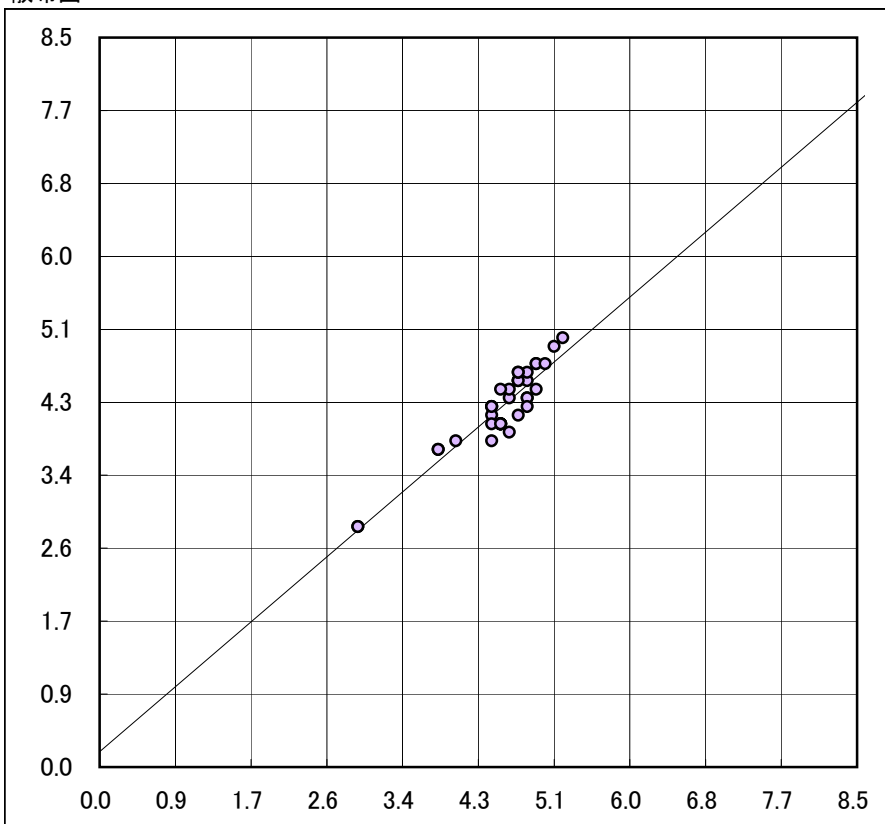

試料 血清

X軸
 装置 日立7170
 メーカー 積水メディカル
 項目 ALB(7170)
 試薬名 オートセラ ALB
 単位 g/dl

Y軸
 装置 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー 積水メディカル
 項目 ALB
 試薬名 エクセライザALB
 単位 g/dl

n = 38

r = 0.9288

Y = aX + b
 傾き a 0.8902 切片 b 0.182

X平均 = 4.51

Y平均 = 4.20

Sy·x = 0.175

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1			4.8	4.5	4.4	4.0				
2			4.4	4.2	4.5	4.0				
3			4.6	4.3	4.9	4.4				
4			4.4	4.2	4.8	4.2				
5	2.9	2.8	4.8	4.6	5.1	4.9				
6	2.9	2.8	4.9	4.7	4.4	4.2				
7	3.8	3.7	5.2	5.0	4.7	4.6				
8	3.8	3.7	4.4	4.1	4.7	4.6				
9	4.7	4.5	4.5	4.0	4.4	3.8				
10	4.7	4.5	4.5	4.0	4.7	4.1				
11			4.5	4.0	4.5	4.4				
12			4.8	4.3	4.0	3.8				
13			4.6	4.4						
14			4.9	4.7						
15			4.7	4.5						
16			5.0	4.7						
17			4.8	4.3						
18			4.5	4.0						
19			4.6	3.9						
20			4.5	4.0						