



# 相関性

項目 : IP  
 施設 : カスタマーサポートセンター  
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー : 積水メディカル(株)  
 試薬名 : エクセライザIP  
 単位 : mg/dl

差のプロット(Xに対するY-X)

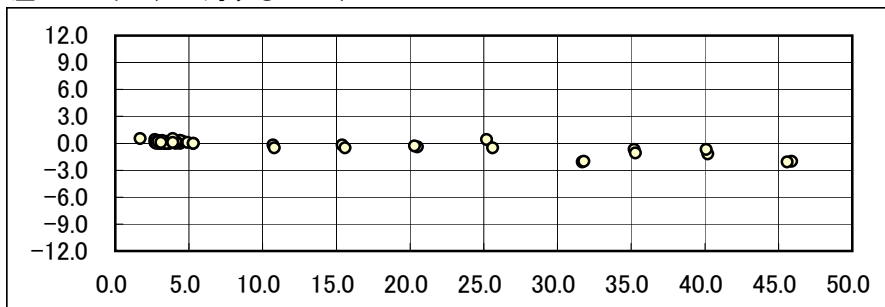

散布図

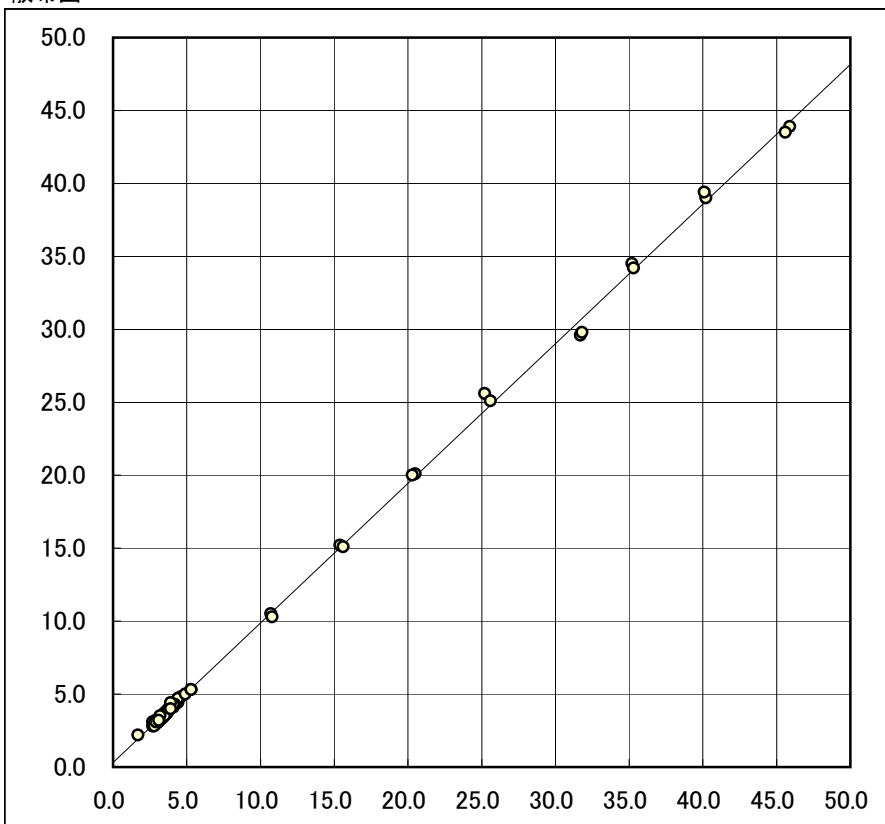

試料 血清

X軸  
 装置 日立7170  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 IP 7170  
 試薬名 オートセラIP  
 単位 mg/dl

Y軸  
 装置 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 IP  
 試薬名 エクセライザIP  
 単位 mg/dl

n = 57

r = 0.9996

Y = aX + b  
 傾き a 0.9572 切片 b 0.30

X平均 = 10.50

Y平均 = 10.36

Sy·x = 0.32

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	4.4	4.4	3.6	3.6	3.9	4.0				
2	4.4	4.7	3.7	3.7	2.9	3.1				
3	4.6	4.8	3.3	3.4	3.1	3.2				
4	3.9	4.2	4.1	4.1	5.3	5.3				
5	4.0	4.1	3.3	3.4	5.3	5.3				
6	4.4	4.7	3.5	3.6	10.7	10.5				
7	4.0	4.2	3.8	4.0	10.8	10.3				
8	3.4	3.4	1.7	2.2	15.4	15.2				
9	2.7	3.1	45.9	43.9	15.6	15.1				
10	4.9	5.0	45.6	43.5	20.5	20.1				
11	3.1	3.1	3.0	3.0	20.3	20.0				
12	3.7	3.9	3.5	3.5	25.2	25.6				
13	3.0	3.2	40.2	39.0	25.6	25.1				
14	3.5	3.7	4.2	4.3	31.7	29.6				
15	2.9	3.2	3.2	3.5	31.8	29.8				
16	3.1	3.2	40.1	39.4	35.2	34.5				
17	3.3	3.4	3.9	4.0	35.3	34.2				
18	3.3	3.4	2.8	2.8						
19	3.3	3.3	4.1	4.3						
20	2.7	2.8	3.9	4.4						