



相関性

項目 : CRP
 施設 : カスタマーサポートセンター
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー : 積水メディカル(株)
 試薬名 : エクセライザ CRP
 単位 : mg/dl

差のプロット(Xに対するY-X)

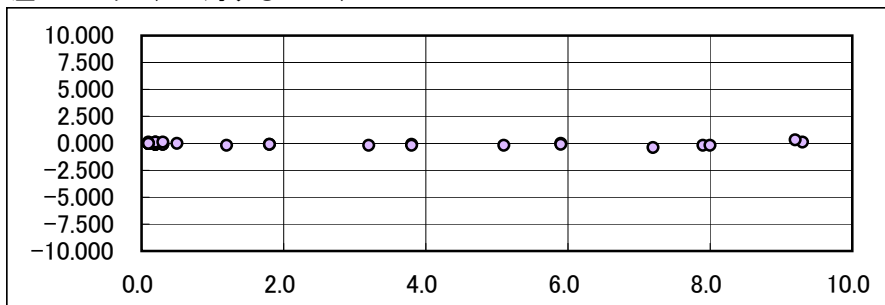

散布図

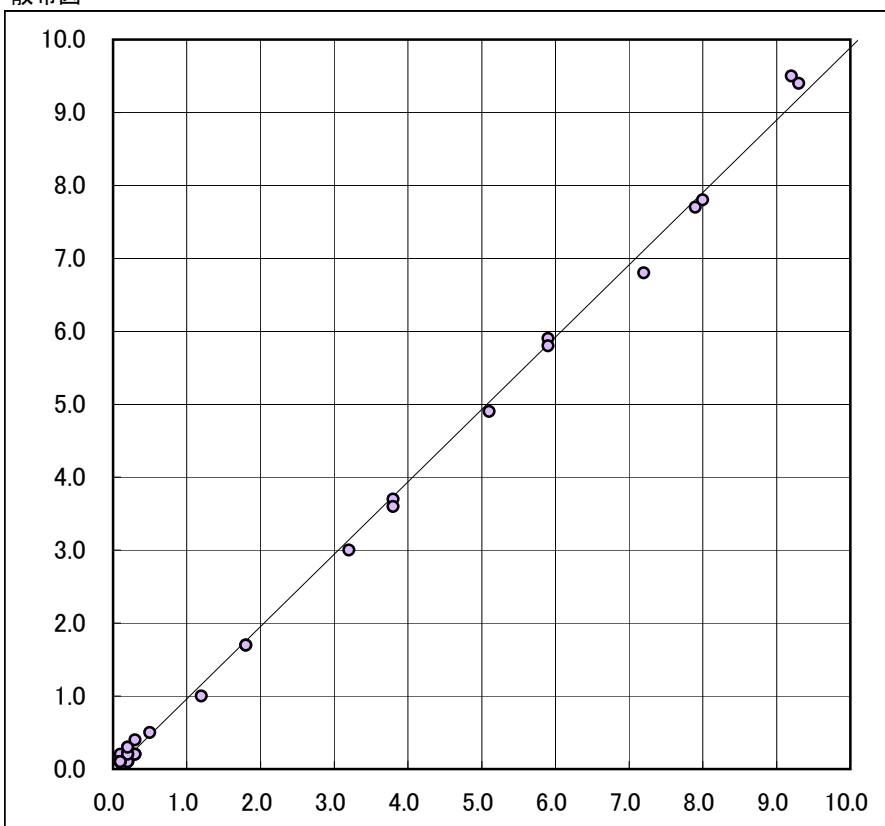

試料 血清

X軸
 装置 日立7170
 メーカー 積水メディカル
 項目 CRP(7170)
 試薬名 ナノピア CRP
 単位 mg/dl

Y軸
 装置 日立クリニカルアナライザーS40
 メーカー 積水メディカル
 項目 CRP
 試薬名 エクセライザ CRP
 単位 mg/dl

n = 41

r = 0.9991

Y = aX + b
 傾き a 0.9918 切片 b -0.0306

X平均 = 1.93

Y平均 = 1.88

Sy·x = 0.1176

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	1.8	1.7	0.2	0.1	9.2	9.5				
2	1.8	1.7	0.3	0.2						
3	3.8	3.7	0.1	0.1						
4	3.8	3.6	0.1	0.1						
5	5.9	5.9	3.2	3.0						
6	5.9	5.8	0.1	0.1						
7	7.9	7.7	5.1	4.9						
8	8.0	7.8	0.1	0.1						
9	0.1	0.2	0.2	0.1						
10	0.1	0.1	0.2	0.2						
11	0.5	0.5	0.2	0.2						
12	0.2	0.1	0.2	0.1						
13	0.1	0.1	0.1	0.1						
14	0.2	0.2	0.2	0.2						
15	0.3	0.2	0.2	0.3						
16	0.2	0.2	0.3	0.4						
17	0.2	0.3	0.1	0.1						
18	0.2	0.1	0.1	0.1						
19	0.1	0.1	1.2	1.0						
20	7.2	6.8	9.3	9.4						