



# 相関性

項目 : HbA1c  
 施設 : カスタマーサポートセンター  
 装置 : 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー : 積水メディカル(株)  
 試薬名 : エクセライザHbA1c  
 単位 : %

差のプロット(Xに対するY-X)

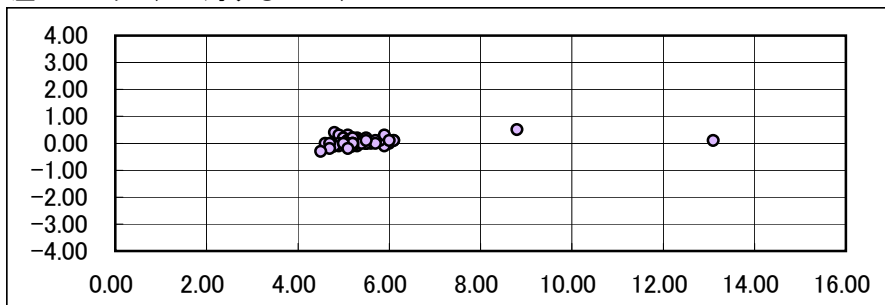

散布図

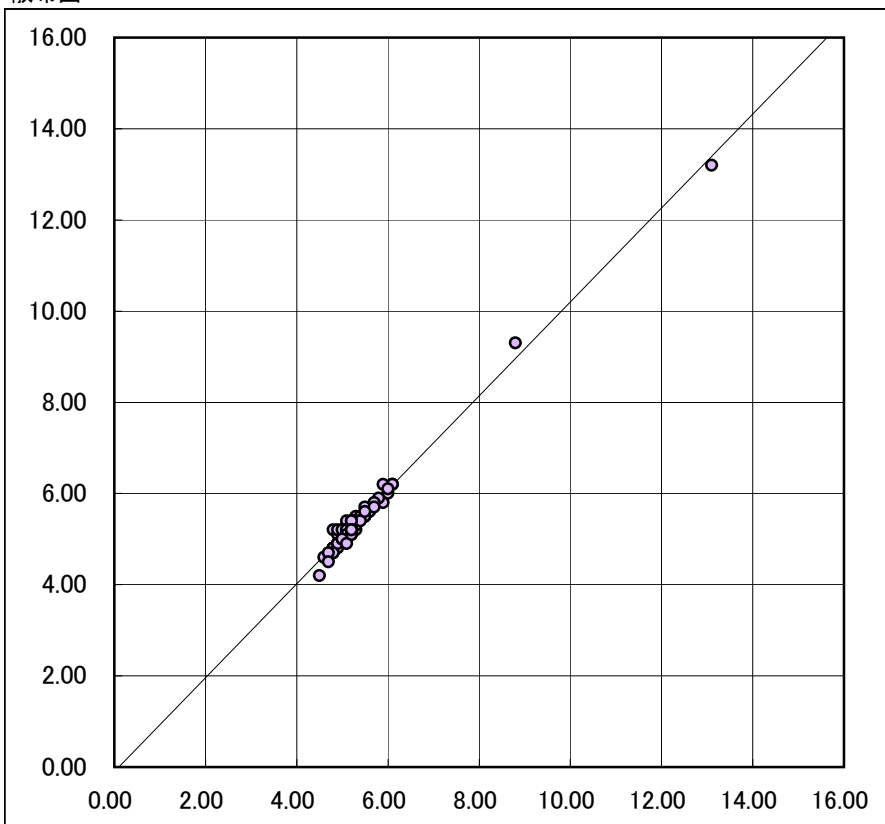

試料 EDTA血漿

X軸  
 装置 日立7180  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 HbA1c(7180)  
 試薬名 ノルディアHbA1c  
 単位 %

Y軸  
 装置 日立クリニカルアナライザーS40  
 メーカー 積水メディカル  
 項目 HbA1c(S40)  
 試薬名 エクセライザHbA1c  
 単位 %

n = 69

r = 0.9935

Y = aX + b  
 傾き a 1.0302 切片 b -0.103

X平均 = 5.37

Y平均 = 5.43

Sy·x = 0.130

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	5.3	5.2	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7		
2	5.1	5.3	5.5	5.7	5.7	5.7	6.0	6.1		
3	5.1	5.2	5.1	5.4	13.1	13.2	5.0	5.0		
4	4.8	5.2	5.8	5.9	5.0	5.1	4.7	4.7		
5	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2		
6	5.5	5.5	6.1	6.2	5.0	5.2	5.0	5.0		
7	5.3	5.5	5.2	5.3	5.1	5.2	4.7	4.5		
8	4.9	5.1	5.7	5.8	5.1	5.2	5.1	4.9		
9	5.1	5.3	5.2	5.3	5.4	5.4	4.5	4.2		
10	5.2	5.3	5.1	5.1	5.1	5.2				
11	5.3	5.3	8.8	9.3	5.2	5.1				
12	5.3	5.4	4.8	4.8	5.2	5.4				
13	5.2	5.2	5.9	6.2	5.5	5.6				
14	5.4	5.5	4.8	4.8	5.2	5.4				
15	5.5	5.5	5.1	5.2	4.8	4.7				
16	5.2	5.3	4.6	4.6	5.1	5.1				
17	6.0	6.0	6.1	6.2	5.2	5.2				
18	5.9	5.8	5.3	5.4	5.2	5.1				
19	5.6	5.6	4.9	4.9	5.2	5.2				
20	5.5	5.5	5.1	5.2	4.9	4.9				