

2011年3月

お客様 各位

製造販売元 積水メディカル株式会社

キット付属の検体採取用綿棒の取り扱いについて

謹啓 時下ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております下記製品において、製品付属の綿棒にて検体採取の際、使用方法によってまれに綿棒が折れることがあります。

つきましては、付属の検体採取用綿棒にて検体を採取する際は、下記の点に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

- 1) 綿棒に破損・折れ・曲がりなどがあつた場合は使用しないでください。
- 2) 検体を採取する前に綿棒の軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないでください。
- 3) 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして、綿棒の軸を折らないように注意してください。軸が折れた場合、採取部位の粘膜を傷つけたり、折れた綿棒が鼻腔内に残留するおそれがあります。
- 4) 小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。

安全に検査を行っていただくため、宜しくご高配の程お願い申し上げます。

謹白

記

〈対象製品〉

- ラピッドテスト® FLU II
- ラピッドテスト® FLUスティック
- ラピッドテスト® カラーFLUスティック
- ラピッドテスト® RSV-アデノ

以上

【お問い合わせ先】

積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター
電話番号:0120-249-977 FAX番号:0120-247-477