



greiner bio-one

Your Power for Health

SEKISUI



クエン酸ナトリウム  
3.2%入り 微量血液容器

# クエン酸ナトリウム3.2%入り 微量血液容器

本製品はカルシウムをキレート除去するクエン酸ナトリウムがあらかじめ入れられた血液容器です。血液収容後の収容量は1.0mLです。

キャップの色は国際的な色分けに準拠したライトブルーを採用しております。直射日光を避け、4-25°Cで保管してください。

## 微量血液容器

医療機器ではございません。  
ご使用の際には、  
十分にご注意ください。



## 使用方法



1 チューブキャップを取り外します。



2 静脈血をチューブに移します。



3 オリジナルキャップでチューブを閉じます。



4 採取後にすぐチューブを数回軽く反転させます。



5 必要に応じて、13x75 キャリアチューブにチューブを挿入することができます。

## 製品概要

商品コード	検査項目	品名	添加物	キャップカラー	血液収容量	包装
534386	凝固検査	クエン酸Na3.2%イリケツエキヨウキ SMD-MSC100-N	3.2%クエン酸Na水溶液	ライトブルー	0.9mL*	50本

\*クエン酸Na3.2%入り微量血液容器の管に表示されている容量(1mL)は、薬剤0.1mLと血液0.9mLの合計を示しています。

## アクセサリ

商品コード	品名	包装
534393	SMD-キャリアチューブ	500本

\*本製品は医療機器ではございません。

販売元

**積水メディカル株式会社**

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目1番3号

【お問合せ先】 コールセンター：0120-249-977

<http://www.sekisuimedical.jp/>

輸入元

**株式会社グライナー・ジャパン**

MC-02r1

0320 D I 30  
2019-0021